

Guide de l'utilisateur

clarity[®]
SMART FOR SENIORS

Alto[™]

Téléphone amplifié avec DCP[™] et haut-parleur



 **PRÉSENCE**
www.presence.qc.ca
☎ 418.681.2470

TABLE DES MATIÈRES

Mesures de Sécurité importantes	4
ClarityLogic™	6
Contenu de Pièces de la Liste de Verification	8
Installation de base	9
Fixation murale	10
Présentation de votre Alto	11
Utilizer de votre Alto	15
Fonction boost – Amplification des sons entrants	15
Boost Override (Boost continu)	16
Programmation/modification des touches de numérotation rapide	17
OSA - Amplification du volume sortant.	18
L'Information Technique	18
Dépannage	19

MESURES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Quand vous utilisez votre équipement téléphonique, des mesures de sécurité simple devraient toujours être sui-vis pour réduire le risque de feu, choc électrique et blessures aux personnes incluant :

1. Lire et comprendre toutes mode d'emploi.
2. Suivre tout les avis et les modes d'emploi indiqués sur le téléphone.
3. Ne pas utiliser ce téléphone près d'un bain, un lavabo, un évier de cui sine ou un bac, dans une cave mouillée, près d'une piscine ou aux endroits ou il y a de l'eau.
4. Évitez l'utilisation d'un telephone (autre qu'un type sans fil) durant un orage. Il y a une chance de recevoir un choc électrique d'un éclair.
5. Ne pas employer le téléphone pour signaler une fuite de gaz dans les environs de la fuite.
6. Débranchez ce téléphone de la prise de courant murale avant de le nettoyer. Ne pas utiliser des produits nettoyant liquide ou aérosol sur le téléphone. Employez un étoffe humecter pour nettoyer.
7. Placez ce téléphone sur une surface bien équilibrée. Des dommages sérieux et/ou blessures peuvent résulter si le téléphone tombe.
8. Ne pas couvrir les fentes et les ouvertures sur ce téléphone. Ce téléphone ne devrait jamais être placé sur ou proche d'une chauffer ette ou d'un registre de chaleur. Ce téléphone ne devrait pas être placé dans une installation encastrée à moins qu'une ventilation correcte soit fournie.
9. Faites fonctionner ce téléphone en utilisant la tension électrique déclarée sur la base de l'unité ou dans le manuel d'utilisateur. Si vous n'êtes pas certains de la tension dans votre maison, consultez votre distributeur ou votre compagnie de pouvoir régional.
10. Ne placez rien sur le cordon d'alimentation. Installez le téléphone ou personne ne marchera ou trébu chera sur le cordon.
11. Ne surchargez pas les prises murales ou les cordes de prolongation comme ceci peut augmenter le risque du feu ou de choc électrique.
12. Ne jamais pousser des objets dans les fentes du téléphone. Ils peuvent toucher des points de tensions dan gereuses ou causer des courts-circuits qui pourraient résulter en in cendie ou choc électrique. Ne jamais renverser du liquide de n'importe quel genre sur le téléphone.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

MESURES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

13. Pour réduire le risque de choc électrique, ne pas démonter ce téléphone. Ouvrir ou enlever des couvertures peut vous exposer à de dangereuses tensions ou à d'autres risques. Un remontage incorrect peut causer un choc électrique quand l'appareil est utilisé par la suite.
14. Débranchez cet appareil de la prise de courant murale et envoyez le service d'entretien au fabricant sous les conditions suivantes : Quand la corde ou la prise d'alimentation d'énergie est frangée ou endommagée ; Si on a renversé le liquide dans le produit ; Si du liquide a été renversé dans l'appareil ; Si le téléphone a été exposé à la pluie ou à de l'eau ; Si le téléphone a tombé ou si l'étui est endommagé ; Si le téléphone indique un changement distinct dans l'exécution ; Si le téléphone ne fonctionne pas comme d'habitude, même en suivant le mode d'emploi. Seulement régler les commandes traitées dans le Mode D'emploi. Un réglage incorrect peut exiger un travail vaste par un technicien qualifié pour rétablir le téléphone à une opération normale.
15. Ne jamais installer une connexion téléphonique pendant un orage électrique.
16. Ne jamais installer de prises téléphoniques dans des emplacements mouillés à moins que la prise est spécifiquement conçue pour des emplacements mouillés.
17. Ne jamais toucher de fils téléphoniques non isolés ou de bornes à moins que la ligne téléphonique a été débranchée à l'interface de réseau.
18. Faites attention en installant ou en modifiant les lignes téléphoniques.

MESURES DE SÉCURITÉ POUR PILES

Disposez les piles usagées selon les directives.

1. Ne pas jeter les piles dans un feu, elles peuvent exploser. Vérifiez les réglementations locales pour des instructions de décharge spéciales.
2. Ne pas ouvrir ou dégrader les piles. L'électrolyte relâché est corrosif et peut causer des blessures aux yeux et à la peau. Ceci peut être toxique si avalé.
3. Faites attention durant le maniement des piles afin de ne pas causer un court-circuit à la pile avec des matériaux sous courants tels que les bagues, les bracelets et les clefs. La pile ou le matériel de conduction peut surchauffer et peut causer des brûlures.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

Introduction à Clarity Logic

ClarityLogic est le nom de notre service d'assistance au client simplifié et facile à utiliser. Lorsque vous parlez avec un représentant de Clarity, le téléphone envoie à Clarity des informations comme le nom du modèle et les paramètres. Le représentant est donc immédiatement informé du type de téléphone et des paramètres utilisés. Cela permet de réaliser des communications de dépannage à la fois simples et rapides, qui vous aident à trouver exactement ce dont vous avez besoin. Appelez simplement le 1-877-LOGIC24 (1-877-564-4224) pour constater à quel point Clarity peut vous simplifier la vie.

Touche mémoire ClarityLogic®

Pour votre confort, Clarity a préprogrammé le numéro d'assistance client sur le bouton bleu ClarityLogic de votre téléphone.

Remarque : *ClarityLogic a été conçu pour fonctionner avec le service téléphonique de base. Si votre service téléphonique est pourvu par un fournisseur de large bande, ClarityLogic peut ne pas fonctionner. SEUL CLARITYLOGIC PEUT ÊTRE DÉACTIVÉ. TOUTES LES AUTRES CARACTÉRISTIQUES FONCTIONNENT CONFORMÉMENT AUX DESCRIPTIONS DE CE GUIDE DE L'UTILISATEUR.*

INTRODUCTION

Merci d'avoir acheté votre nouveau Fortissimo de Clarity – fournir une expérience supérieure en offrant un son clair et fort, pour vous assurer de ne jamais manquer un mot nouveau. S'il vous plaît lire ces instructions pour vous assurer de profiter de la gamme complète de fonctionnalités riches que ce produit offre.



Notre société

Clarity, une division de Plantronics (NYSE : PLT), crée des solutions de communication intelligentes pour aider les personnes âgées à vivre de manière épanouie et active. Fondé il y a plus de 40 ans, Clarity est un leader mondial du secteur des téléphones amplifiés, des systèmes de notification et des dispositifs d'écoute assistée.

Clarity produit sept lignes de produits et services : Clarity,[®] Clarity Professional,[®] ClarityLife,[®] Clarity AlertMaster,[®] ClarityLogic,[®] Ameriphone,[®] et les combinés / appareils d'essai Walker[™].

Les produits de communication innovante de la société sont tous conçus pour aider les personnes présentant des problèmes d'audition, une perte de vision, une mobilité réduite, des problèmes de dextérité ou d'autres problèmes de santé.


CONTENU DE PIÈCES DE LA LISTE DE VÉRIFICATION

Votre forfait comprend tous les éléments, comme indiqué ici. S'il ya quelque chose manque, s'il vous plaît contacter notre service client immédiatement.

NOTE : VEUILLEZ MAINTENIR UN COPY DE LA PREUVE DE L'ACHAT POUR VOS DISQUES.




Combiné

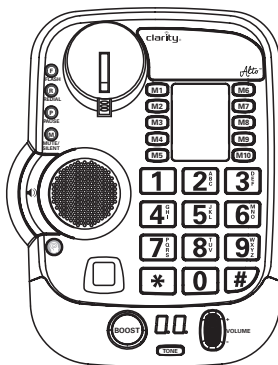

Unité de base



Cordon de Ligne
Téléphonique (une
longue corde et
une corde courte)

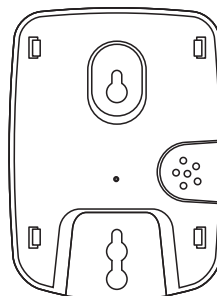

Support de fixation



Adaptateur CD



Manuel d'Utilisation



Cordons enroulé
du combine

INSTALLATION DE VOTRE ALTO

Installation de base

- Étape 1 :** Installez les piles de secours (en option) en retirant le couvercle de la batterie. N'utilisez que des piles alcalines AA. NE PAS installer de piles rechargeables. **(Figure 1)**
- Étape 2 :** Tirez sur les extrémités du cordon téléphonique pour démêler le cordon ; branchez l'extrémité libre du cordon téléphonique dans la prise téléphonique murale. **(Figure 2)**
- Étape 3 :** Placez le combiné sur le support.
- Étape 4 :** Tirez sur les extrémités du cordon d'alimentation pour démêler le cordon ; branchez l'adaptateur sur une prise électrique de votre mur.
- IMPORTANT :** N'utilisez qu'avec une source d'alimentation de Class (Classe) 2, fournie avec votre produit.
- Étape 5 :** Une fois l'installation terminée, décrochez le combiné pour tester l'appareil. Si vous entendez une tonalité de numérotation, votre téléphone est prêt à l'emploi. Si ce n'est pas le cas, revérifiez toutes les connexions.

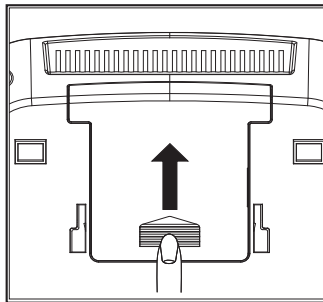


Figure 1

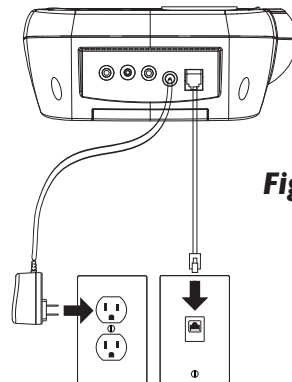


Figure 2

En cas de panne de courant, l'Alto conservera sa pleine amplification pendant un maximum de 48 heures avec quatre piles AA alcalines de secours (non incluses).

En cas de panne et d'absence de piles, le téléphone fonctionne comme un téléphone ordinaire. Dans ce cas, les voyants lumineux, la sonnerie forte, le clavier éclairé et l'amplification seront désactivés ; vous serez toujours en mesure de passer et de recevoir des appels téléphoniques, mais l'amplification supplémentaire du volume ne pourra être utilisée.

Nous vous conseillons d'installer des piles si vous habitez dans une zone sujette à des pannes d'électricité fréquentes.

INSTALLATION DE VOTRE ALTO

Fixation murale

Étape 1 : Retirez le crochet du combiné de la base et inversez sa position, de sorte que le crochet se trouve pointe vers le haut et qu'il puisse soutenir le combiné lorsque vous raccrochez. **(Figure 3)**

Étape 2 : Tirez sur les extrémités du cordon téléphonique pour démêler le cordon; insérez le cordon dans la rainure située sur la partie arrière du téléphone. Insérez les pattes de support de fixation dans les fentes à l'arrière du téléphone. Appuyez sur le support de fixation et enfoncez-le fermement jusqu'à ce qu'il s'enclenche. **(Figure 4)**

Étape 3 : Branchez le cordon téléphonique plat dans la prise murale, puis aligner les trous du support de fixation sur les montants de la plaque murale et faites glisser la base du téléphone vers le bas pour la fixer sur le mur. **(Figure 5)**

Figure 3

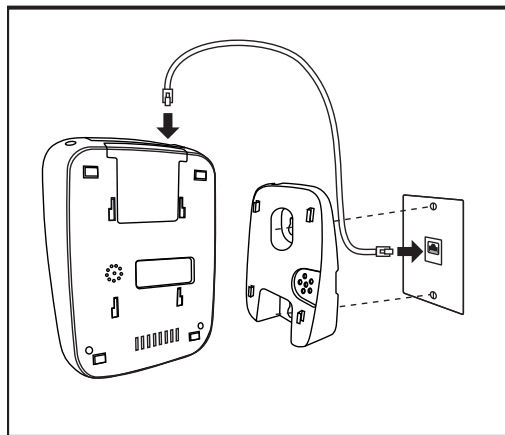
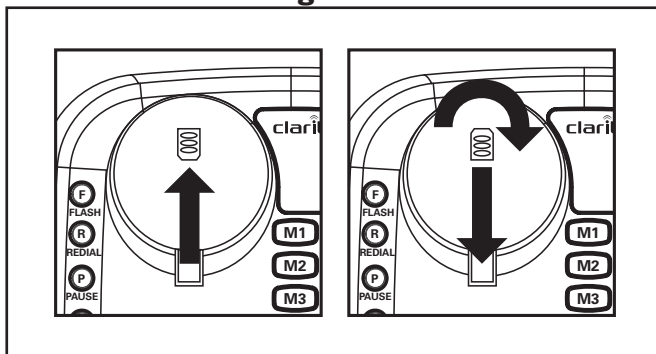


Figure 4


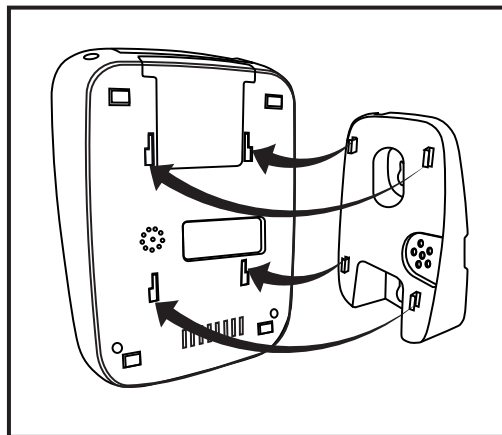


Figure 5

PRÉSENTATION DE VOTRE ALTO

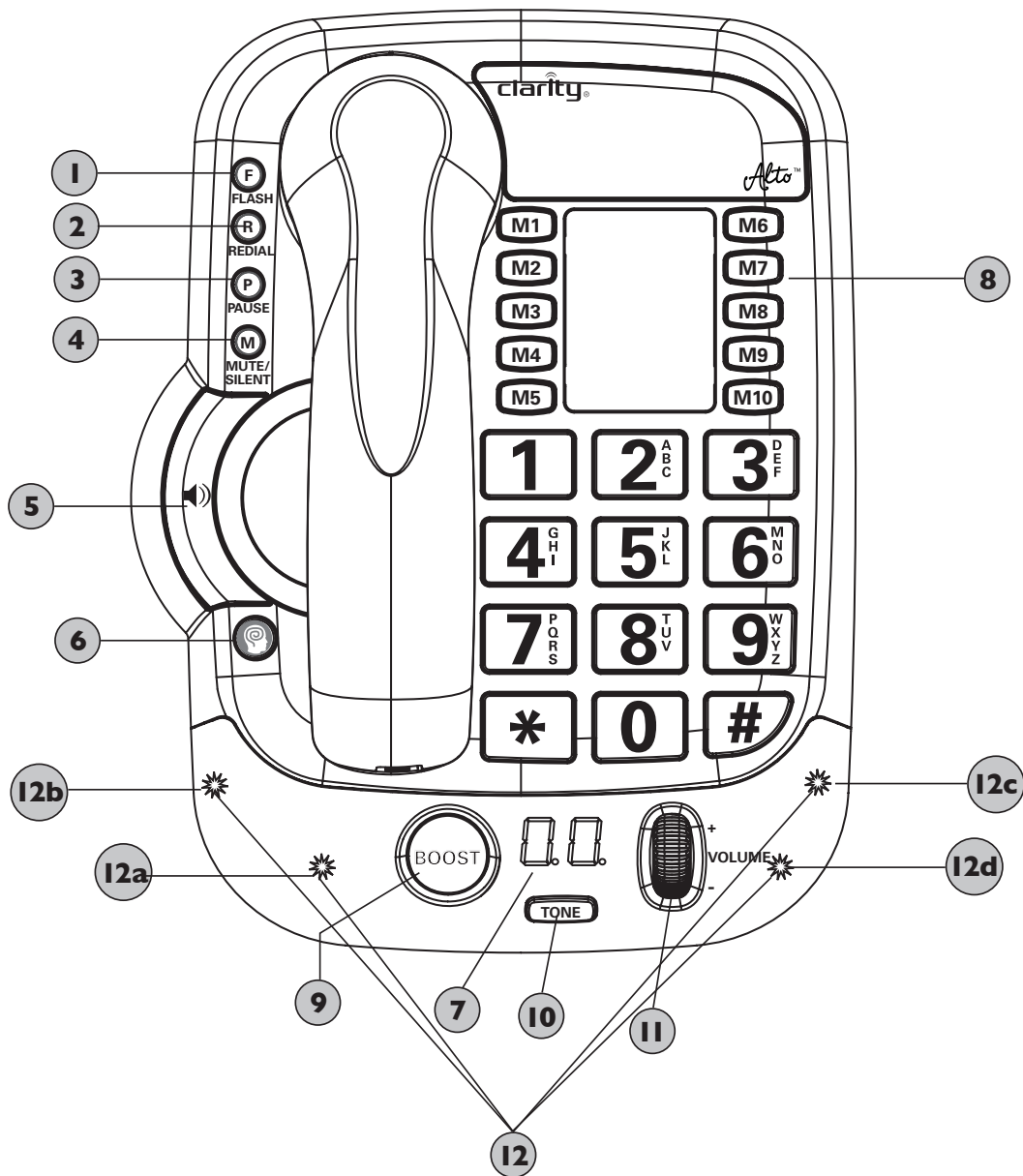

PRÉSENTATION DE VOTRE ALTO

1. Touche **FLASH** : utilisez ce bouton pour activer la fonction appel en attente / appel en attente avec identificateur d'appel (fonction fournie par votre compagnie de téléphone locale).
2. Touche **REDIAL (Rapel)** : appuyez sur cette touche pour recomposer le dernier numéro composé (jusqu'à 32 chiffres).
3. Touche **PAUSE** : en mode programmation, appuyez sur cette touche pour insérer une pause de deux secondes.
4. Touche **MUTE/SILENT (SOURDINE/SILENCE)** :
 - a. **Pendant un appel** : appuyez sur **MUTE/SILENT** pour mettre votre côté de la conversation en sourdine pour plus d'intimité ; le bouton rouge clignote pour indiquer que vous êtes en mode MUTE (SOURDINE) ; appuyez à nouveau sur **MUTE/SILENT** pour désactiver la fonction et reprendre votre appel.
 - b. **En mode veille** : appuyez sur **MUTE/SILENT** pour désactiver la sonnerie ; le bouton à rétroéclairage rouge s'allume lorsque la sonnerie est désactivée..
 - c. **Pendant un appel** : appuyez sur **MUTE/SILENT** pour éteindre la sonnerie pour cet appel uniquement ; le téléphone sonnera lors du prochain appel.
5. Touche **(haut-parleur)** : appuyez sur cette touche pour activer la fonction haut-parleur ; appuyez à nouveau pour désactiver la fonction. Lorsque le haut-parleur est activé, le bouton à rétroéclairage rouge est allumé.
6. Touche **ClarityLogic** : appuyez sur le bouton bleu pour prendre directement contact avec un représentant du service à la clientèle.
7. **Affichage DEL à 2 chiffres** : affiche le volume (des appels entrants et de la sonnerie) ; lorsque la touche **TONE (TONALITÉ)** est appuyée pendant un appel, l'écran affiche brièvement les réglages de tonalité du téléphone ; appuyez sur **TONE** pendant l'affichage des réglages et l'écran affiche le nouveau réglage de tonalité au fur et à mesure que vous naviguez d'une tonalité à l'autre.
8. Touches **NUMÉROTATION RAPIDE (MI – M10)** : pour les numéros sauvegardés (voir **NUMÉROTATION RAPIDE**).
9. Touche **BOOST** : appuyez sur **BOOST** pour activer l'amplification supplémentaire du volume. En mode Boost On (allumé), le volume du téléphone s'étend sur une plage allant jusqu'à 50dB. Lorsque le mode Boost est activé, la touche rouge à rétroéclairage s'allume. Appuyez à nouveau sur la touche **BOOST** pour éteindre l'amplification sup-

PRÉSENTATION DE VOTRE ALTO

plémentaire du volume.

- a. Appuyez sur la touche **BOOST** et maintenez-la enfoncée (5 secondes) pour activer la fonction OSA (Outgoing Speech Amplification - Amplification du volume sortant).
Veillez lire la section OSA avant d'activer cette fonction.

10. Touche **TONE** :

- a. **Pendant un appel** : appuyez sur la touche **TONE** pour naviguer entre les réglages de tonalité préétablis de votre unité, et sélectionnez la tonalité la plus adaptée à vos besoins. Votre unité dispose de cinq tonalités prédéfinies, allant de fréquences accentuées basses à des fréquences accentuées hautes ; les réglages sont spécifiquement conçus pour garantir la meilleure expérience audio pendant vos appels téléphoniques. L'une des tonalités est conseillée pour les personnes utilisant des appareils de correction auditive, dans la mesure où elle offre une performance élevée tout en tenant compte de la présence du dispositif. Le réglage de la tonalité est affiché sur l'écran au moment où vous naviguez entre les différents réglages.
 - i. Appuyez sur la touche **TONE** et maintenez-la enfoncée pour passer en mode Personnaliser, ce qui vous permettra de régler avec plus de précision le son des appels entrants. Voir section **Fonction Boost – Amplification des sons entrants**.
- b. **En mode veille** : appuyez sur la touche **TONE** pour naviguer entre les différents réglages de sonnerie disponibles. Vous pouvez choisir entre six sonneries différentes, couvrant une variété de tonalités, pour garantir que vous entendrez toujours la sonnerie des appels entrants.


11. Molette du **VOLUME**

- a. **Pendant un appel** : faites tourner la molette du volume pour augmenter ou baisser le volume de l'appel entrant. En montant le volume, vous remarquerez que la touche **BOOST** s'allume lorsque vous passez en mode Boost On.
- b. **En mode veille** : faites tourner la molette du volume pour augmenter ou baisser le volume de la sonnerie. La sonnerie se fera entendre de cette façon tant que le téléphone est en mode veille.

12. Voyants lumineux de la sonnerie : la sonnerie dispose de quatre voyants lumineux qui s'allument (et clignotent) lorsque le téléphone sonne. De plus, ces voyants lumineux rendent compte de différentes fonctions (si les fonctions sont activées – décrites ci-dessous de gauche à droite sous le voyant de la sonnerie) :

PRÉSENTATION DE VOTRE ALTO

- a. **Voyant d'appel en absence** : s'allume lorsque la fonction APPEL EN ABSENCE est activée (ON) et que vous avez reçu au moins un appel auquel vous n'avez pas répondu..
- b. **Voyant de la messagerie vocale** : s'allume lorsque l'interrupteur MESSAGERIE VOCALE est activé (ON) et que vous avez un nouveau message vocal (service vendu séparément, acquis auprès de votre fournisseur de services téléphoniques).
- c. **Voyant OSA** : s'allume lorsque la fonction OSA (Amplification du volume sortant) est activée.
- d. **Voyant de batterie faible** : s'allume lorsque vos piles de secours doivent être remplacées.

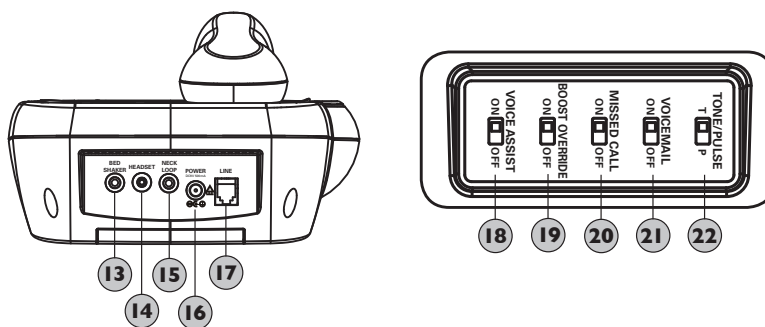

- 13. Port BEDSHAKER (VIBREUR DE LIT)** :insérer le vibreur de lit en option (vendu séparément, modèle C2210). Il vibre pour vous avertir lors d'appels entrants. Pour plus d'information concernant l'achat de ce dispositif, veuillez prendre contact avec Clarity au 1 800 426 3738.
- 14. Port HEADSET (CASQUE)** : insérez un casque standard (prise de 2,5 mm) à utiliser à la place du combiné. Pour plus d'information concernant l'achat de ce dispositif, veuillez prendre contact avec Clarity au 1 800 426 3738.
- 15. Port NECKLOOP (COLLIER INDUCTIF)** : branchez un collier inductif standard (mono, prise de 3,5 mm) pour utiliser votre appareil de correction auditive à collier. Nous recommandons le collier inductif CE30 de Clarity. Pour plus d'information concernant l'achat de ce dispositif, veuillez prendre contact avec Clarity au 1 800 426 3738.

PRÉSENTATION DE VOTRE ALTO

16. Port **POWER (ALIMENTATION)** : (pour l'adaptateur d'alimentation)
17. Port **LINE (LIGNE)** : (pour le cordon du téléphone)
18. Interrupteur **VOICE ASSIST (ASSISTANT VOCAL)** : réglez sur ON (allumé) si vous souhaitez entendre un signal sonore lorsque vous appuyez sur les pendant la composition du numéro – aussi bien à travers le combiné qu'avec le haut-parleur.
19. Interrupteur **BOOST OVERRIDE (BOOST CONTINU)** : réglez sur ON (allumé) si vous souhaitez que la fonction Boost soit activée au début de tous les appels.
20. Interrupteur **MISSED CALL (APPEL EN ABSENCE)** : réglez sur ON (allumé) si vous souhaitez activer le voyant d'appels en absence.
21. Interrupteur **VOICEMAIL (MESSAGERIE VOCALE)** : réglez sur ON (allumé) si vous souhaitez activer le voyant de Messagerie vocale (service fournit par votre fournisseur de téléphonie local). Lorsque vous avez un message, le voyant de la messagerie vocale situé sous le voyant de la sonnerie s'allume.
22. Interrupteur **TONE/PULSE** : réglez cet interrupteur sur la méthode de composition souhaitée.

UTILISER DE VOTRE ALTO

Votre appareil a été conçu en conformité avec la nouvelle norme TIA-4953, qui détermine les performances auditives spécifiques pour compenser la perte légère ou sévère de l'audition. Votre Alto offre une performance audio supérieure et une sonnerie à volume élevé afin de garantir que vous ne ratiez plus aucun appel ou aucun mot prononcé pendant la conversation.

Fonction boost – Amplification des sons entrants

1. Pendant les appels, appuyez sur la touche **BOOST** pour activer l'amplificateur. Le téléphone Alto dispose d'une touche **BOOST** et d'une molette de contrôle du volume permettant de contrôler le volume du récepteur. (**Figure 6**) Une fois que vous avez appuyé sur la touche **BOOST** (ou que la molette de contrôle du volume est au-dessus du niveau 9), un niveau d'amplification supplémentaire est ajouté à la plage de contrôle de volume. Pendant les appels, la touche **BOOST** permet d'allumer ou d'éteindre la fonction d'amplification de Clarity Power selon vos besoins. La touche **BOOST** se

UTILISER VOTRE ALTO

remet automatiquement en position initiale chaque fois que vous raccrochez le combiné (à moins d'activer la fonction Boost continu – voir la section Boost continu). La touche **BOOST** rouge s'allume lorsque la fonction BOOST est activée.

ATTENTION : VOLUME ÉLEVÉ. Pour protéger votre audition, baissez le contrôle du volume avant d'activer la fonction Boost.

- Utilisez la molette de **VOLUME** pour régler le son au niveau souhaité (jusqu'à 50dB d'amplification). La molette de contrôle du volume permet de régler le niveau de volume du combiné en mode Boost ou en mode normal. Une fois que la touche **BOOST** est enfoncée, l'Alto fournit un volume allant jusqu'à 50dB. (**Figure 7**)
- Appuyez sur la touche **BOOST** pour personnaliser votre expérience sonore. Nous avons tous des préférences auditives différentes, c'est pourquoi nous vous conseillons d'explorer chaque réglage afin de trouver l'option la plus adaptée à votre confort. Ces cinq réglages préétablis, ainsi que le réglage personnalisé et l'amplificateur de volume, font partie intégrante de la technologie Digital Clarity Power (DCP™). (**Figure 8**)

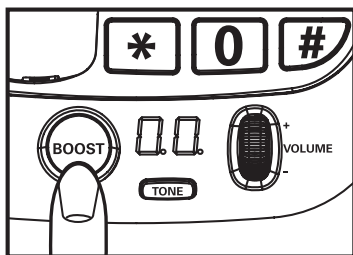


Figure 6

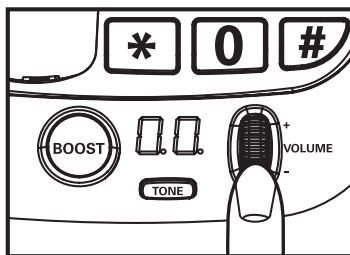


Figure 7

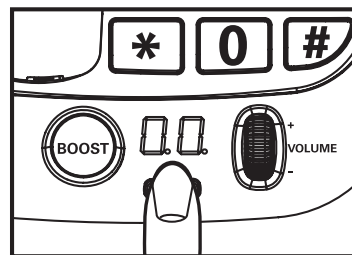


Figure 8

Les réglages disponibles sont :

- t1** - Accent sur les fréquences basses : préférable pour entendre les sons graves et faibles
- t2** - Réponse en fréquence uniforme : préférable si vous avez besoin d'amplifier toute la gamme sonore de la voix
- t3-t4** - Accent sur les fréquences hautes : deux réglages, pour s'adapter de la meilleure manière au niveau de perte auditive de la plupart des gens

UTILISER VOTRE ALTO

ha (Hearing Aid - appareil de correction auditive) - cette option est recommandée pour les personnes utilisant un appareil de correction auditive - garantit une meilleure performance audio tout en tenant compte de la présence de l'appareil de correction à proximité du combiné

Personnalisé (tc) - En plus des paramètres prédéfinis, l'Alto dispose d'un mode personnalisé qui peut être consulté en appuyant sur le bouton **tone** jusqu'à ce que le pavé numérique clignote une fois et vous entendez un bip, l'écran affiche un numéro qui clignote (indiquant le réglage de la tonalité) ; faites tourner la molette de **VOLUME** vers le haut et vers le bas (gamme : réglages de 0 à 60) jusqu'à atteindre le meilleur réglage pour votre audition. Pour sauvegarder ce réglage, relâchez la molette de volume et attendez que l'écran affiche à nouveau le niveau du volume, OU appuyez rapidement sur **tone** - vous verrez le symbole « **tc** » s'afficher sur votre écran. Vous disposez désormais d'un sixième réglage de tonalité - personnalisé selon vos besoins. Vous pouvez parcourir les réglages préétablis et le nouveau réglage personnalisé en appuyant sur la touche **tone** pendant vos appels.

REMARQUES :

1. Le mode Tonalité personnalisée est disponible uniquement s'il a été activé (en appuyant et en maintenant enfoncée la touche **tone** pendant un appel).
2. La touche Boost n'est pas active en mode haut-parleur.

Boost Override (Boost continu)

L'interrupteur de la fonction Boost continu se trouve sur la partie inférieure de l'Alto. Lorsque l'interrupteur est réglé sur ON (allumé), la fonction Boost est activée automatiquement chaque fois que vous décrochez le téléphone. En utilisation normale, lorsque l'interrupteur de la fonction Boost continu est réglé sur OFF (éteint), la fonction s'éteint dès lors que vous raccrochez le combiné. Nous conseillons de régler l'interrupteur sur ON (allumé) si tous les utilisateurs du téléphone ont besoin de l'amplification. Le fait de régler l'interrupteur sur OFF (éteint) peut s'avérer utile lorsque des personnes à capacités auditives différentes utilisent le même téléphone..

ATTENTION : VOLUME ÉLEVÉ. Activez la fonction BOOST CONTINU uniquement lorsque tous les utilisateurs du téléphone ont besoin que la fonction Boost soit activée pendant tous les appels.

UTILISER VOTRE ALTO

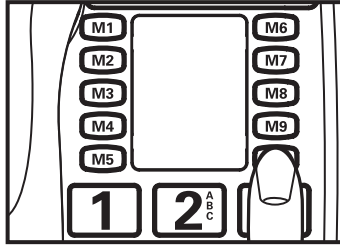


Figure 9

Programmation/modification des touches de numérotation rapide

Cette fonction permet à l'utilisateur de programmer ou de modifier les numéros des dix touches de numérotation rapide ou d'apporter des modifications aux numéros déjà programmés.

Pour programmer les touches de numérotation rapide :

1. Appuyez sur la touche de numérotation rapide que vous souhaitez programmer (par exemple, **M10**) et maintenez-la enfoncée - vous entendrez un bip et le clavier se mettra à clignoter ; relâchez la touche **M10**. (Figure 9)
2. Composez le numéro de téléphone que vous souhaitez programmer.
3. Appuyez à nouveau sur le bouton de numérotation rapide en question (**M10**) puis relâchez. Vous entendrez trois bips, le clavier cessera de clignoter et le bouton de numérotation rapide sera désormais programmé avec le numéro de téléphone que vous avez composé lors de l'étape précédente.

Pour modifier les numéros précédemment programmés, répétez la séquence de programmation.

REMARQUE : La programmation d'une touche écrase le numéro précédemment sauvegardé dans cet emplacement.

Pour composer les nombres sauvés :

1. En mode de combiné, soulevez le combiné et appuyez sur la touche mémoire appropriée.
2. En mode de speakerphone, appuyez sur la touche mémoire appropriée avec le combiné dans le berceau.

En mode conversation

Lors d'un appel, l'écran à 2 chiffres affiche le niveau du volume ; si vous souhaitez voir le réglage actuel de la tonalité, appuyez brièvement sur la touche **TONE** pendant l'appel.

UTILISER VOTRE ALTO

Outgoing Speech Amplification (OSA - Amplification du volume sortant)

Cette fonction amplifie le son de votre voix de façon à ce que la personne à l'autre bout du fil vous entende mieux. Pour activer cette fonction, appuyez sur la touche **BOOST** et maintenez-la enfoncée pendant cinq secondes. Le téléphone émet un bip ; la fonction peut être activée/désactivée lors d'un appel téléphonique ou en mode veille. Le voyant de la fonction OSA s'allume lorsqu'elle est activée.

Pour revenir au réglage par défaut du niveau de volume de votre voix, appuyez à nouveau sur la touche **BOOST** et maintenez-la enfoncée pendant cinq secondes. Vous entendrez un bip confirmant que la fonction est désactivée.

REMARQUE : Pour que les interlocuteurs puissent profiter de la meilleure expérience de qualité audio pendant un appel, nous vous recommandons de n'activer cette fonction que si votre voix est trop faible.

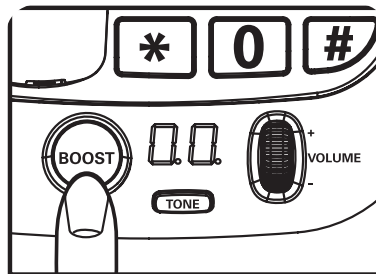


Figure 10

L'INFORMATION TECHNIQUE

Niveau décibel amplifié : 50dB/124dB

Gamme de contrôle de tonalité : 300 à 3000Hertz

Dimensions :

Grosueur : 10" x 7.67" x 4.4" (25.4cm X 19.5cm x 11.2cm)

Poids : 2.45 livres (1.113kg)

Puissance requise :

Adaptateur CD : 9VDC, 800 mA

Piles : 4 piles alcalines AA (non incluses)

DÉPANNAGE

Aucune tonalité/le Téléphone ne Fonctionne Pas

1. Vérifier tous les cordons et connexions. S'assurer qu'ils soient tous bien branchés correctement.
2. Brancher l'unité dans une prise de courant différente pour déterminer si la difficulté provient du téléphone ou des cordons de ligne téléphonique.
3. Neutraliser le combiné ou cordons de ligne téléphonique.
4. Déconnecter tout autre dispositif qui est rattaché au téléphone.

Incapacité de Placer un Appel Externe

1. S'assurer que le commutateur **TONE/PULSE** soit correctement activé.
2. Il se peut que le téléphone soit sur un circuit en boucle. Il se peut que le téléphone ne reçoive pas suffisamment de puissance depuis la ligne téléphonique. Il peut être nécessaire d'attendre quelques seconds après avoir décroché le combiné avant de composer le numéro.
3. Le Alto est incompatible avec le système numérique PBX. Votre Alto devrait bien fonctionner, si une ligne téléphonique standard fonctionne correctement.
4. Il existe un ordinateur avant-gardiste à l'intérieur de Alto. Parfois, après avoir décroché le combiné, il peut se passer une seconde pour permettre au téléphone des'engager. Si vous composez un numéro avant que l'ordinateur ne soit engagé, il se peut que le numéro ne soit pas entièrement enregistré.

La Personne à l'Autre Bout du Fil ne Peut Vous Entendre

1. Un trop grand nombre de téléphones ou d'appareils sur la ligne peut avoir des conséquences sur la transmission de votre téléphone. En tant que directive générale, sachez que plus de cinq (5) téléphones ou appareils peuvent surcharger une ligne téléphonique. Débrancher un (1) ou deux (2) appareils pour vérifier si ceci rectifie la situation. Sinon, vous devriez entrer en contact avec votre compagnie de téléphone pour obtenir des directives de surcharge supplémentaires.
2. Il se peut que vous ne parliez pas directement dans le l'émetteur. Assurez-vous de toujours parler directement dans l'embouchure et, d'un ton de voix normal.

DÉPANNAGE

Incapable d'Entendre le Sonnerie du Téléphone

1. Une trop grande quantité de téléphones ou appareils pour une ligne peut empêcher votre téléphone de sonner. Débrancher un (1) ou deux (2) appareils pour vérifier si le problème est éliminé. Sinon, vous devriez entrer en contact avec votre compagnie de téléphone pour obtenir des directives de surcharge supplémentaires.
2. Si la puissance ne se rend pas à votre appareil téléphonique, la sonnerie forte ne fonctionnera pas.
3. Vérifiez le voyant **MUTE / SILENT** en mode veille - si elle est activée, la sonnerie est silencieuse (elle est désactivée). Appuyez sur le bouton **MUTE / SILENT** à éteindre la lumière - la sonnerie devrait maintenant être audible.

Le Contrôle du Volume Ne Fonctionne Pas

1. **BOOST** doit être activée pour mettre l'amplification additionnelle en marche.
2. Vérifiez les raccordements de puissance. La BOOST ne fonctionnera pas sans batteries de puissance ou de protection.

Impossibilité d'Accéder aux Systèmes Automatisés

Les systèmes Automatisés utilisés par les banques, messageries vocales longue distance ou toutes autres applications, nécessitent un téléphone en mode de composition de tonalité. Vérifier le commutateur à l'arrière du téléphone identifié par **TONE/PULSE** et mettre en fonction à "T". Ceci activera la compatibilité du téléphone avec les systèmes automatisés.

Une coupure de courant ou, un Adaptateur CD incorrectement branché au téléphone peut se traduire par un dysfonctionnement de plusieurs fonctions. L'amplification, la sonnerie puissante ainsi que le clavier éclairé ne fonctionneront pas correctement. Le téléphone épuisera les piles d'urgence rapidement. Ceci aura comme effet d'avoir à changer les piles constamment ainsi que d'un voyant d'indicateur de décharge des piles constamment illuminé.

Ai-je besoin d'installer des Nouvelles Piles?

Les piles sont optionnelles. Elles fournissent un système de secours en cas de coupure de courant. Elles sont recommandées dans les régions où les coupures de courant sont fréquentes. Votre téléphone utilise quatre (4) piles alcalines AA. Elles fourniront les fonctions suivantes : amplification.

Ne marche toujours pas? Si, après être passé par cette liste, le Alto le fonctionne toujours pas correctement, appelez ClarityLogic™ à 1-877-LOGIC24 (1-877-564-4224).



Clarity, a Division of Plantronics, Inc.
6131 Preservation Drive
Chattanooga, TN 37416

Tel: 800-426-3738 Fax: 800-325-8871

E-mail: claritycs@plantronics.com

Website: www.clarityproducts.com

©2013 Clarity, a Division of Plantronics, Inc. All rights reserved. Clarity, Clarity Professional, Clarity, the amplification device, Clarity and the amplification device combined, ClarityLogic, Digital Clarity Power, DCP, Alto, and Smart for Seniors are trademarks or registered trademarks of Plantronics, Inc.

Rev. E (05-15)
Printed in China